

Yapıştırıcıyı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu broşürü dikkatlice okuyun. İleride başvurmak üzere bu broşürü saklayın.

Pakette ne var?

G604 bir silikon yapıştırıcıdır.

Her paket 5g veya 25g yapıştırıcı içerir.

Technovent, Bridgend, CF31 3TB, UK tarafından dağıtılmıştır. Tel: 01656 768566

MBI (Wales) Ltd, Bridgend, CF31 3TB, UK tarafından üretilmiştir. Tel: 01656 768566

Genel Bakış

Bu silikon bazlı yapıştırıcı implant'a tutunan protezleri olan hastalar için tasarlanmıştır. Geleneksel bir yapışkan / yapıştırıcı veya Vazelin kullanmak yerine, bu yapışkan, protezin tüy kenarını yerinde tutmak için yeterli yapışma sağlarken, kolayca da silinebilir. Bu yapıştırıcı, protezi oluşturmak için kullanılan silikon malzemesinde bozulmaya neden olmaz.

Kullanım Talimatları

Tüy kenarın yapıştırılacağı cilde çok ince bir yapışkan miktarı uygulayın.

Kenarı sıkıca bastırın ve fazla materyali bir mendille silin.

Protezi çıkarırken, yapıştırıcıyı bir mendille silin.

Bileşimi / İçindekiler hakkında bilgi.

Dallanmış ve doğrusal silikon zincir kompleksi.

AB Direktifi 1999/45/ EEC'ye göre tehlikeli bileşeni yoktur.

İlk Yardım Tedbirleri

Yutma: Mide rahatsızlıklarına neden olabilir - bol su için ve tıbbi yardım alın.

Ciltle Temas: Fazlalığı alın ve sabun ve suyla yıkayın.

Göz Teması: Geçici tahrişe neden olabilir. Göz kapağını açık tutarak 15 dakika su ile yıkayınız, tahriş devam ederse tıbbi yardım alınız.

Buharın Solunması: Uygulanamaz.

İlacın Saklanması

Kullandıktan sonra kapağı iyi bir şekilde kapatınız.

Oda sıcaklığında saklayın.

Çocukların görüp erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Yalnızca harici kullanım için tasarlanmıştır.