



Pro-Bond Adhesive (G609) [Sayfa 1 of 1]

Yapıştırıcıyı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu broşürü dikkatlice okuyun. İleride başvurmak üzere bu broşürü saklayın.

Pakette ne var?

G609 su bazlı bir yapıştırıcıdır.

Her bir şişe 35ml yapıştırıcı içerir.

Technovent, Bridgend, CF31 3TB, UK tarafından dağıtılmıştır. Tel: 01656 768566

MBI (Wales) Ltd, Bridgend, CF31 3TB, UK tarafından üretilmiştir. Tel: 01656 768566

Genel Bakış

Bu su bazlı yapıştırıcı, protezlerin günlük kullanım için cilde tutunması amacıyla tasarlanmıştır.

Kullanım Talimatları

Yapıştırılacak yüzeylerin temiz ve yağsız / gevşek parçacıklar (makyaj vb.) içermediğinden emin olun. Yapıştırıcıyı protezin arkasına ince bir kaplama şeklinde uygulayın ve yapışkan açık renkli görüne kadar 2-3 dakika kurummasını bekleyin. Ardından protez cilde yapıştırılabilir.

Temizleme - Kalıntıları deriden ve protezden sabun ve suyla çıkarın.

Bileşimi / İçindekiler hakkında bilgi.

Akrilat kopolimerin sulu dispersiyonu.

Tehlikeli bileşen yoktur.

İlk Yardım Tedbirleri

Yutma: Ağız çalkalayın, 1-2 bardak su içiniz, kusturmaya çalışmayın. Doktora danışın.

Ciltle Temas: Akan su ve sabunla yıkayın.

Göz Teması: Hemen bol su ile yıkayın (10 dakika). Gerekirse tıbbi yardım isteyin.

Buharın Solunması: Temiz havaya çıkın, şikayet devam ederse doktora danışın.

İlacın Saklanması

Kullandıktan sonra kapağı iyi bir şekilde kapatınız.

Oda sıcaklığında saklayın.

Çocukların görüp erişemeyeceği yerlerde saklayın.

**Yalnızca harici kullanım için tasarlanmıştır.
Yaralı, hassas cilt üzerinde kullanmaktan kaçının.**